




1 Използвайте **само** универсалните клещи на **Caisley**



2 Поставете първо женската част

Натиснете черната капачка на клещите и я фиксирайте под металната скоба

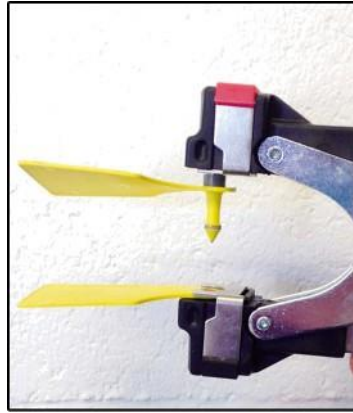


3 Поставете мъжката част

Натиснете я плтно върху щифта



4 Поставете марката

на правилната позиция * и затворете клещите отведнъж и бързо, докато се чуе щракване.

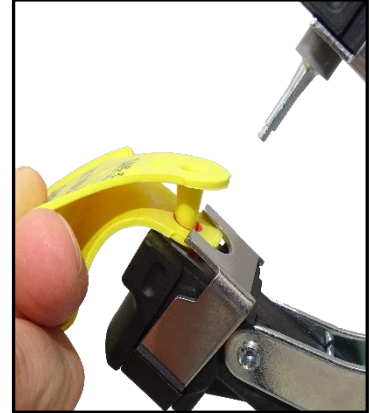


5 Разтворете напълно

клещите и ги издърпайте бързо под лек ъгъл

Правилната позиция на марката е важна

Женската част на марката винаги трябва да е във вътрешното ухо


Това намалява риска от закачане

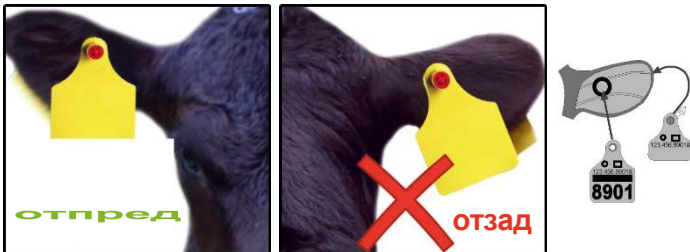

Когато маркирате животното отпред, използвайте дупката в челюстта на клещите за ориентир


Паралелният затвор на клещите осигурява прецизно закопчаване на мъжката и женската част

Не е необходимо да използвате шипът на мъжката част като ориентир за правилно поставяне

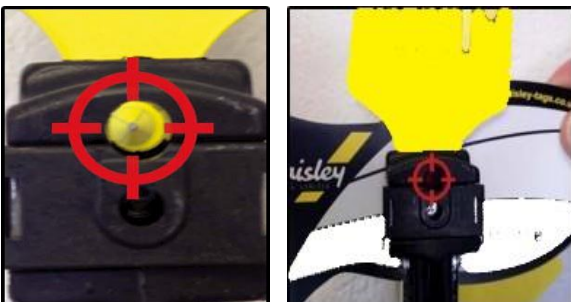

Поставете ушната марка между двете хрущялни ребра на разстояние 1/3 до 1/2 от основата на ухото

Правилна позиция при:

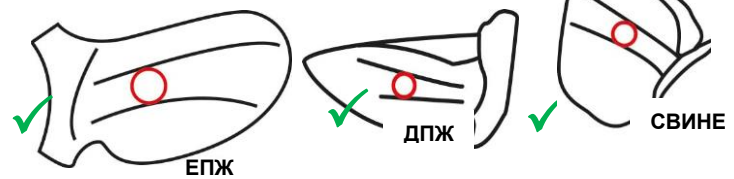

Примери за неправилно поставяне:



Винаги спазвайте добра хигиена при маркиране!

Ръцете на маркировача, ухото, ушните марки и клещите трябва да са чисти

При необходимост дезинфекцирайте с подходящ разтвор

Маркирайте в хладно време (когато е възможно), за да сведете до минимум риска от инфекции

Съхранявайте неизползваните ушни марки на чисто и сухо място

Проверете ухото след около 10 дни за признаци на инфекция

Консултирайте се с вашия ветеринарен лекар, ако е необходимо